

KOKOLINGO

UPUTE ZA KORIŠTENJE WEB APLIKACIJE KOKOLINGO

hrvatske digitalne logopedске vježbenice za djecu s artikulacijskim
poremećajima

Q

G

L

S

R

KOKOLINGO



Kokolingo je hrvatska digitalna logopedska vježbenica za djecu s artikulacijskim poremećajima.

Puna je veselih dječjih multimedijских materijala za rad na izgovoru glasova kod kuće. Olakšava duga ponavljanja i omogućava lako praćenje djetetovog napretka.

Kako se vježba u Kokolingu?

Kokolingo nije potrebno instalirati već ga koristite kao web aplikaciju.
Dovoljno je registrirati se te se ulogirati.

app.kokolingo.hr

Link za registraciju:

<https://app.kokolingo.hr/register/client>



Registracija:

Pritisnite na TERAPEUT – prva registracija.

Besplatna registracija

RODITELJ - prva registracija

TERAPEUT - prva registracija

Imate Kokolingo račun?

E-mail

Lozinka

PRIJAVA

[Zaboravili ste lozinku?](#)

ili sa

Facebook prijava

Google prijava

Ispunite tražene podatke te odredite e-mail i lozinku s kojom ćete ubuduće pristupati Kokolingo vježbenici.

Dobrodošli u KOKOLINGO

PRVA DIGITALNA LOGOPEDSKA VJEŽBENICA ZA DJECU S ARTIKULACIJSKIM POREMEĆAJIMA

Ime i prezime*

Ustanova

E-mail*

Postavite svoju lozinku (minimalno 8 znakova)*

Broj telefona*

Grad

☐ Pročitao sam i prihvaćam [Uvjete korištenja](#) i [Izjavu o privatnosti](#)*

REGISTRACIJA

Imate Kokolingo račun? [IMAM RAČUN](#)

Upis aktivacijskog koda:

Ovdje upišite aktivacijski kod.



Sada možete krenuti s dodavanjem Vaših učenika.



Upišite osnovne podatke o učeniku te vodite bilješke nakon terapija.

KOKOLINGO

Učenici u Kokolingo 25 paketu

DODAJ UČENIKA

Ivana

Učenici koji vježbaju kod kuće

POZOVI UČENIKA

Dosje učenika

Ivana

Dosje učenika

Ime i prezime učenika*

Ivana

Glas koji učenik vježba*

L

Ime i prezime roditelja/skrbnika

Ana Anić

Broj telefona

098 1234 567

Spol

Žensko

Datum rođenja

12.05.2018

E-mail

anaanic88@gmail.com

Adresa


Ulica 45

ARHIVIRAJ

POZOVI UČENIKA

SPREMI


Bilješke

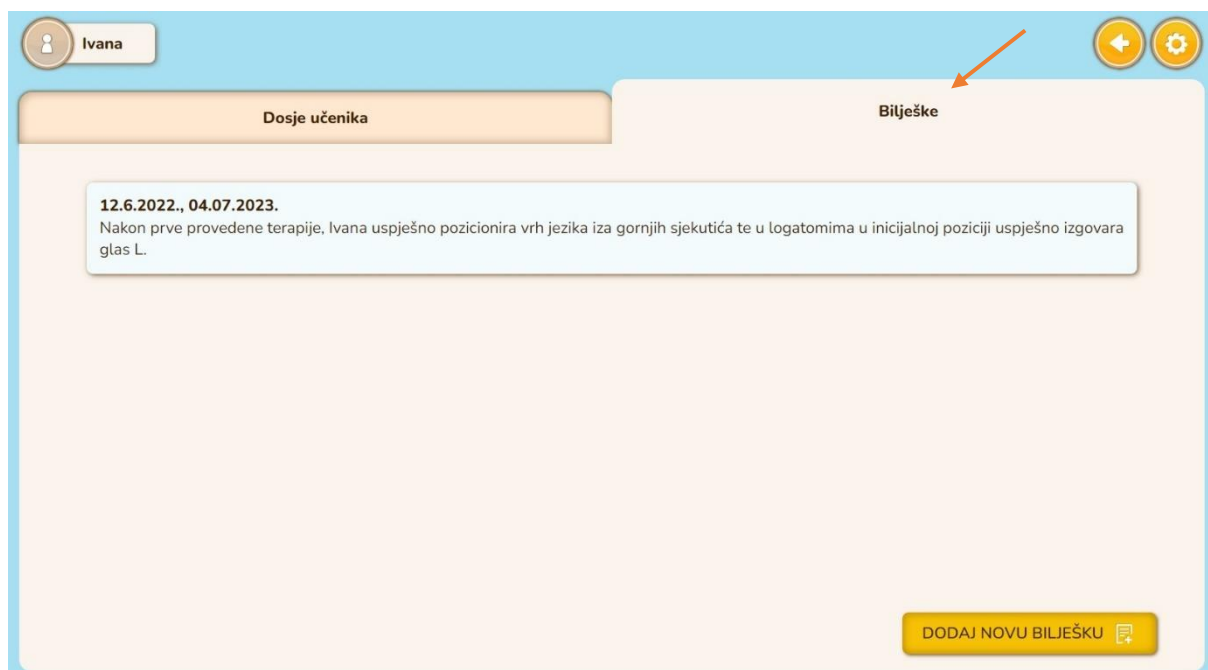

Pritiskom na jednu ili drugu ikonu šaljete e-mail roditelju kako bi mogao pristupiti djetetovom profilu te vježbati kod kuće.



Pritiskom na prikazanu ikonu, dobivate uvid u djetetove statističke podatke, odnosno odrađene vježbe i na terapijama i kod kuće.

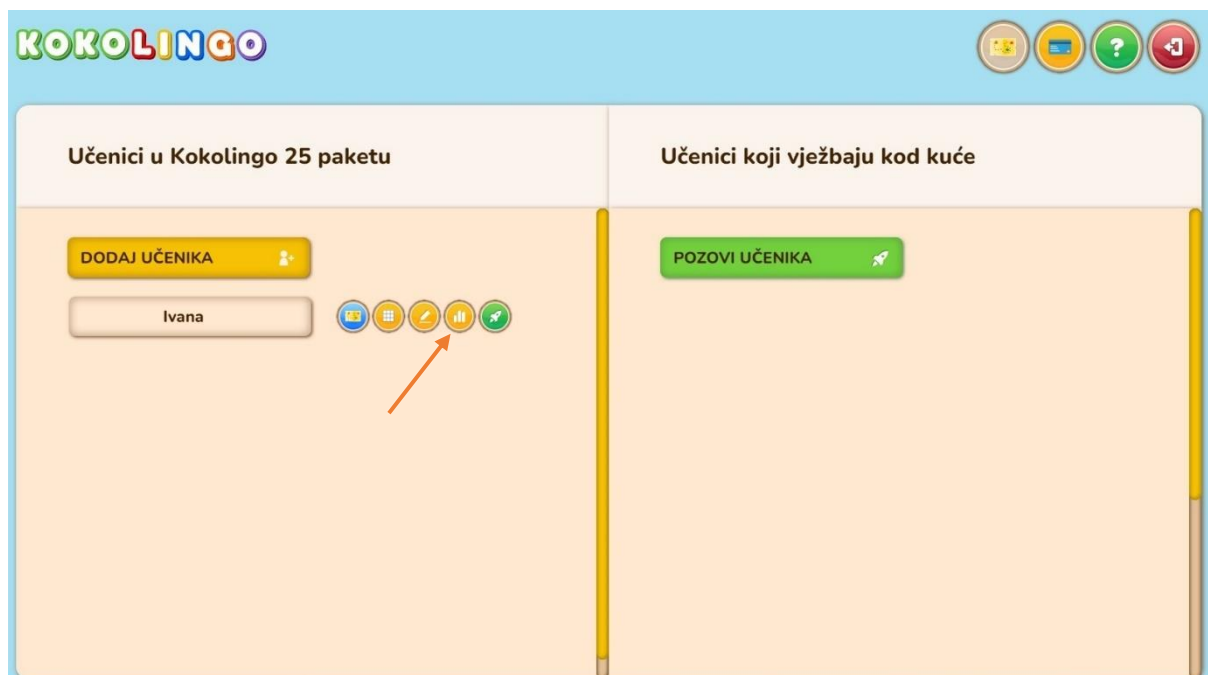

Sada slijedi odabir glasa.




Odabir glasa:


Odaberite željeni glas te pritisnite na „Kreni u avanturu!“.

Mapa


Nakon toga se dolazi na mapu s otocima. Otoci su označeni brojevima i na svaki otok se može kliknuti kako bi se došlo do vježbi koje se nalaze na toj razini.

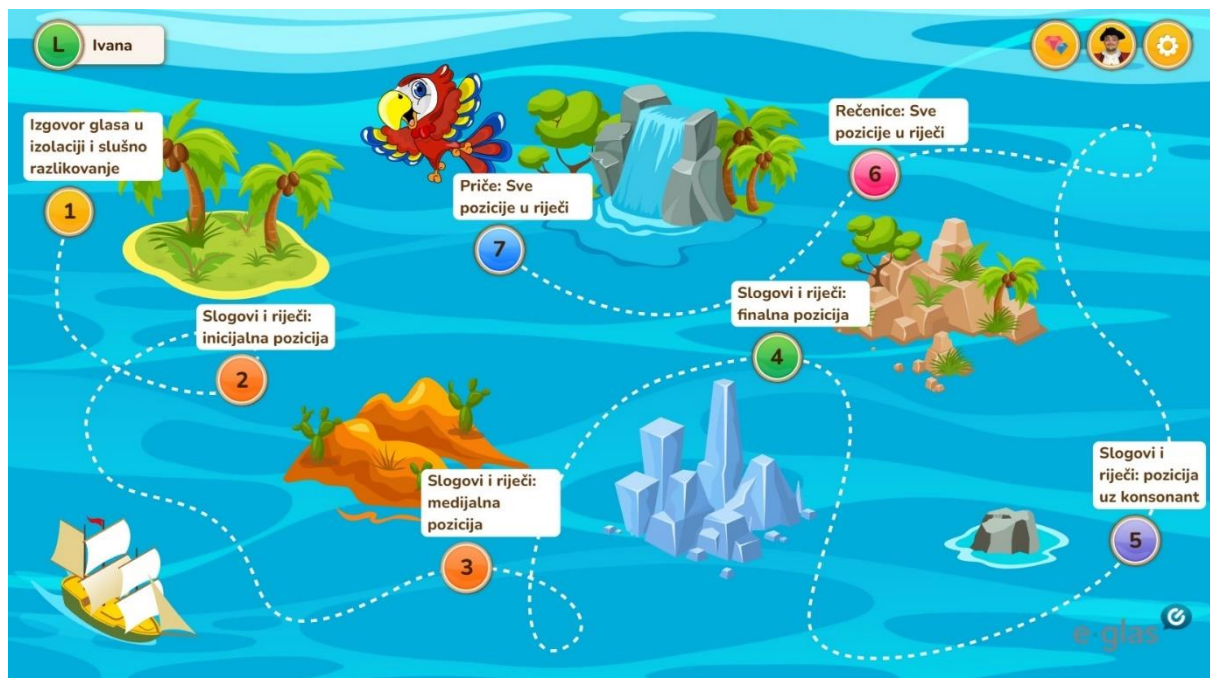


U korisničkim postavkama imate pristup svim potrebnim informacijama.

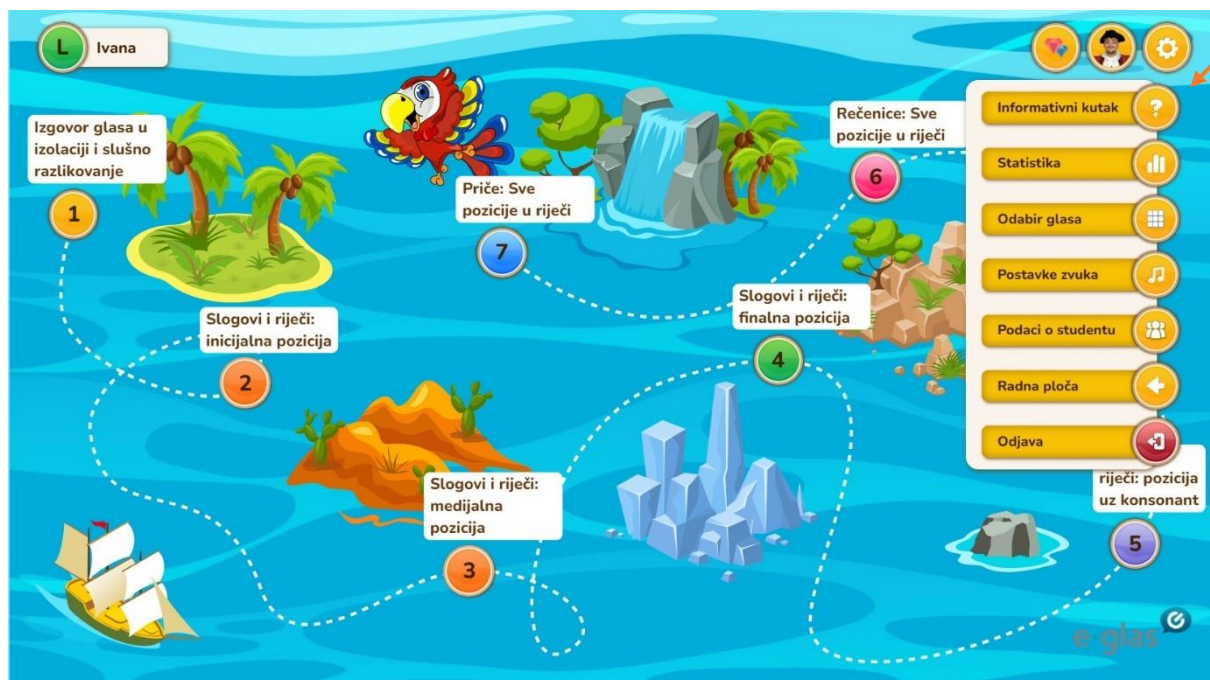

Gusar Srećko može pomoći s opisom zadatka na pojedinom otoku.

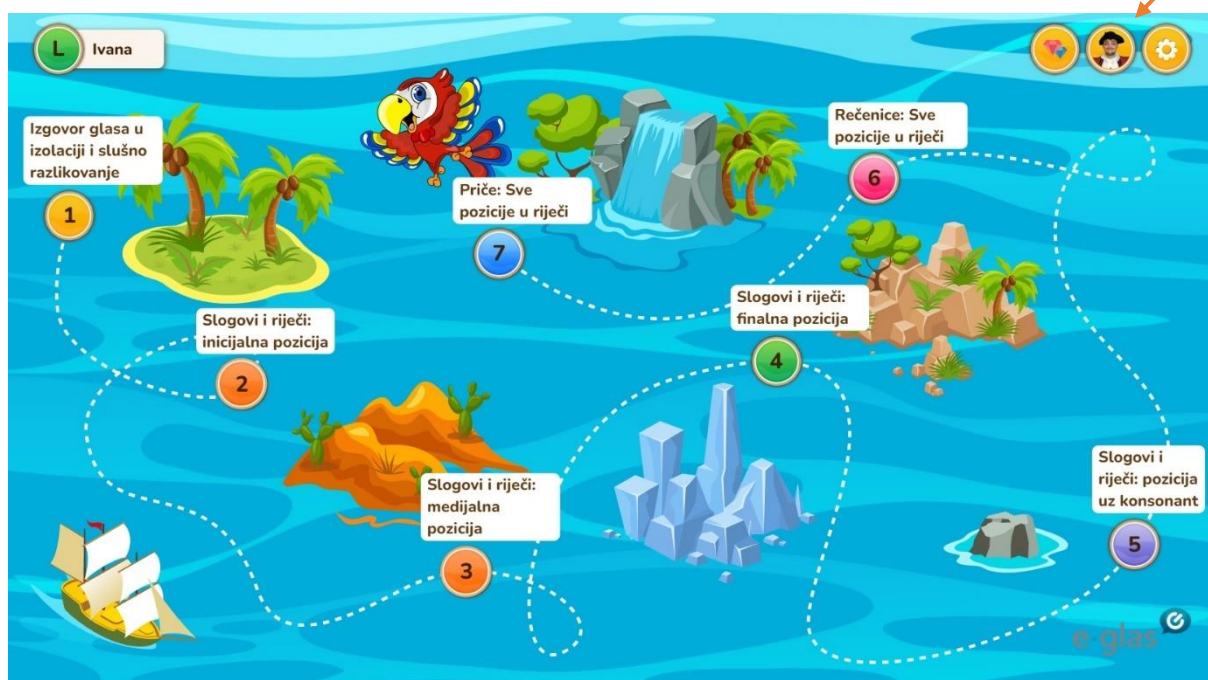


Nakon vrijednog vježbanja, ovdje dijete može potrošiti skupljene novčiće, papigici Koko nešto kupiti i zabavno ju obučiti.

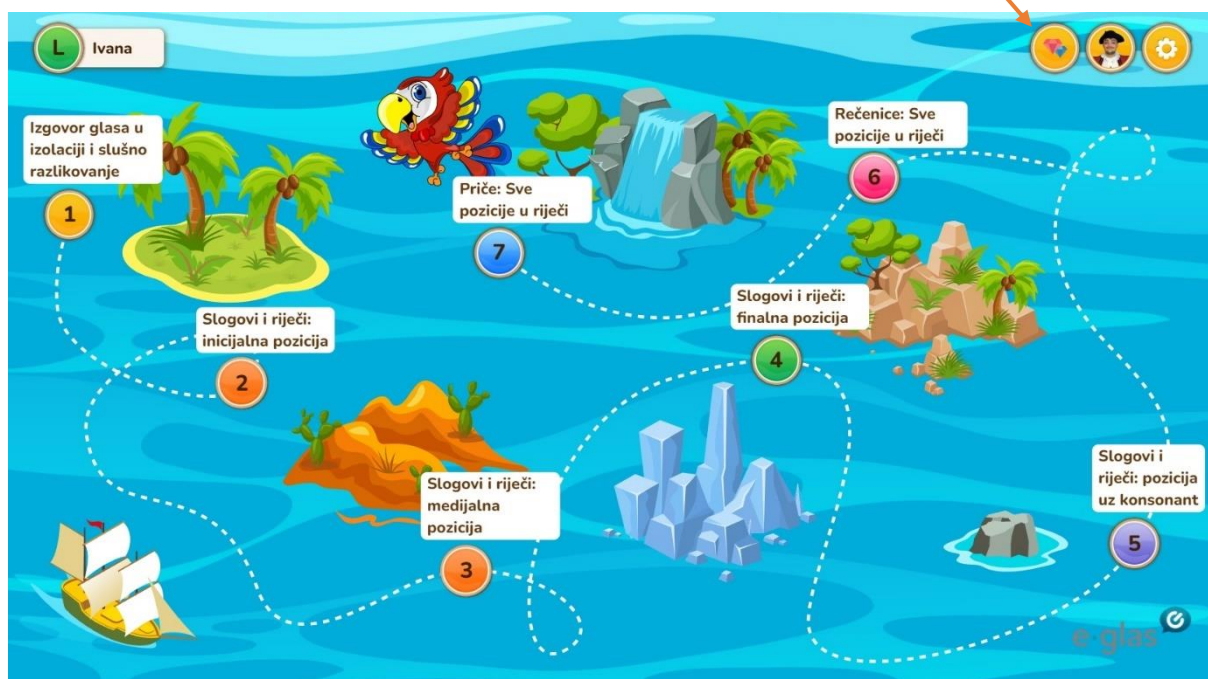


Odabir vježbi:

Krenite s **prvim otokom**, na kojem ćete naći **uvodne vježbe** za usvajanje odabranog glasa.

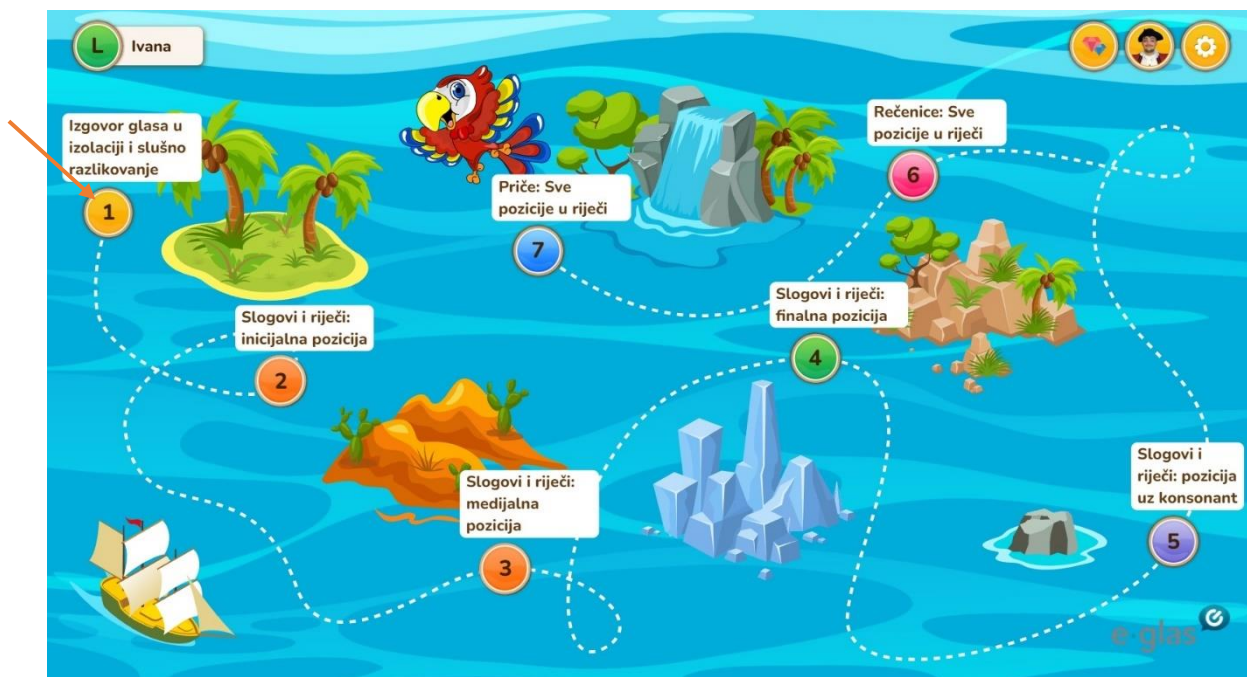


U „Gusarskoj gimnastici“ zadatak je ponavljati pokrete jezikom i usnama koje gusar Srećko pokazuje.

U „Pažljivom slušanju“ uči se razlikovati slušno slične glasove, primjerice L i V.

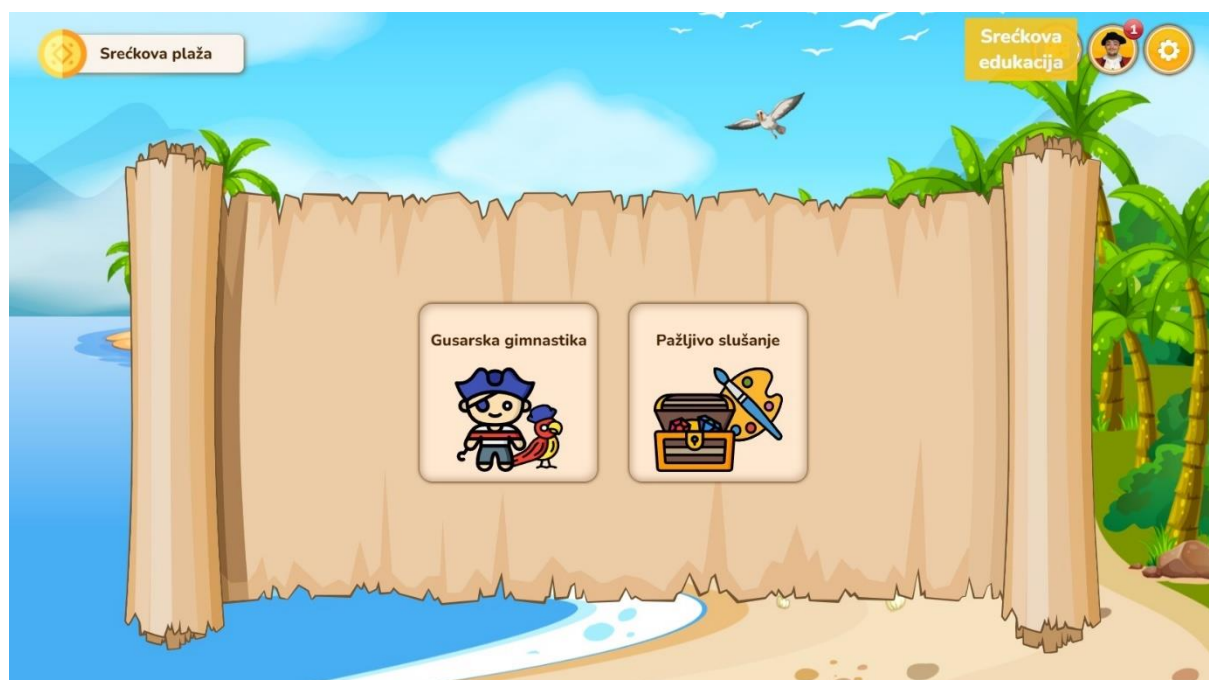

Kada se vježba ponovi, ocijenite kako je vježba izvedena.


Svaka izvedena vježba donosi novčiće koji se skupljaju u škrinju s blagom.

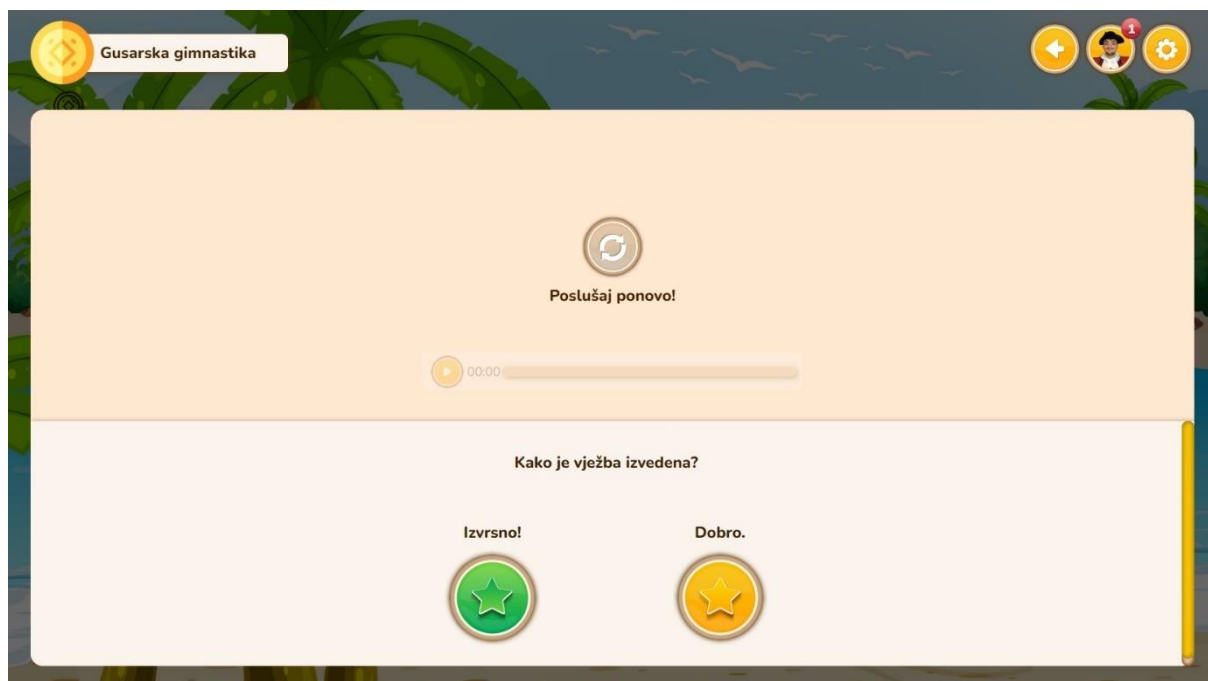


Nakon više skupljenih novčića, papigici Koko može se kupiti vesela odjeća.



Na idućim otocima uvježbava se odabrani glas **na početku, u sredini i na kraju riječi**.

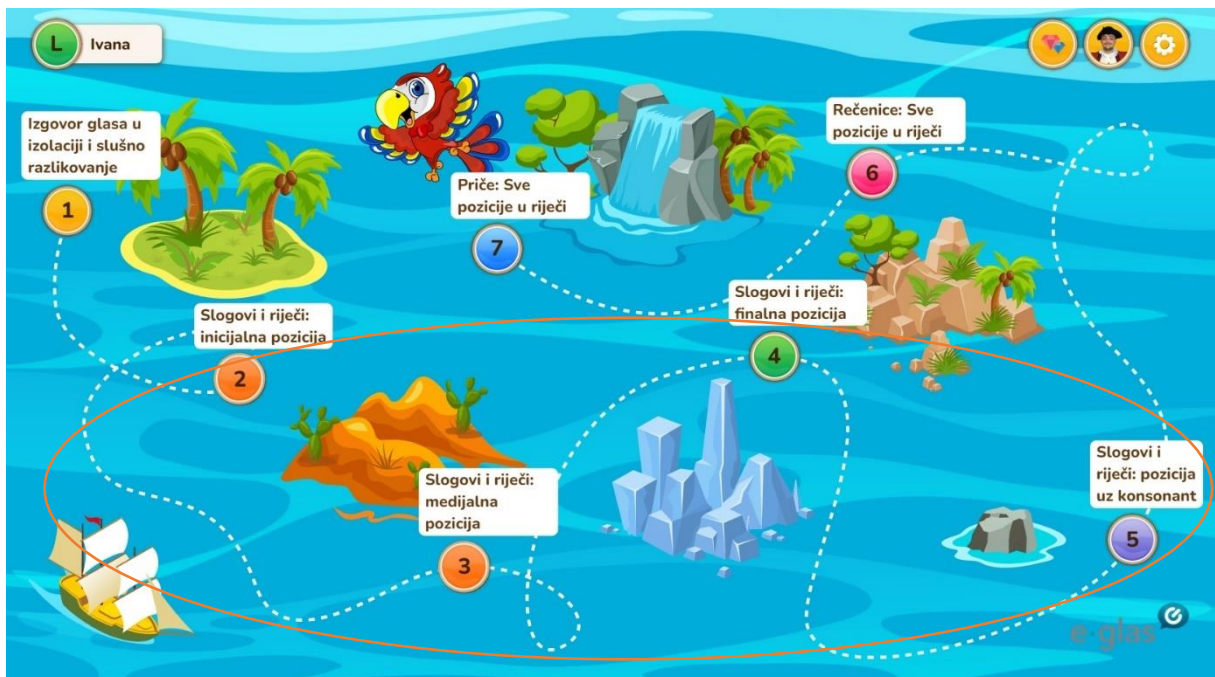


Svaki od navedenih otoka sadrže dvije vrste vježbi.

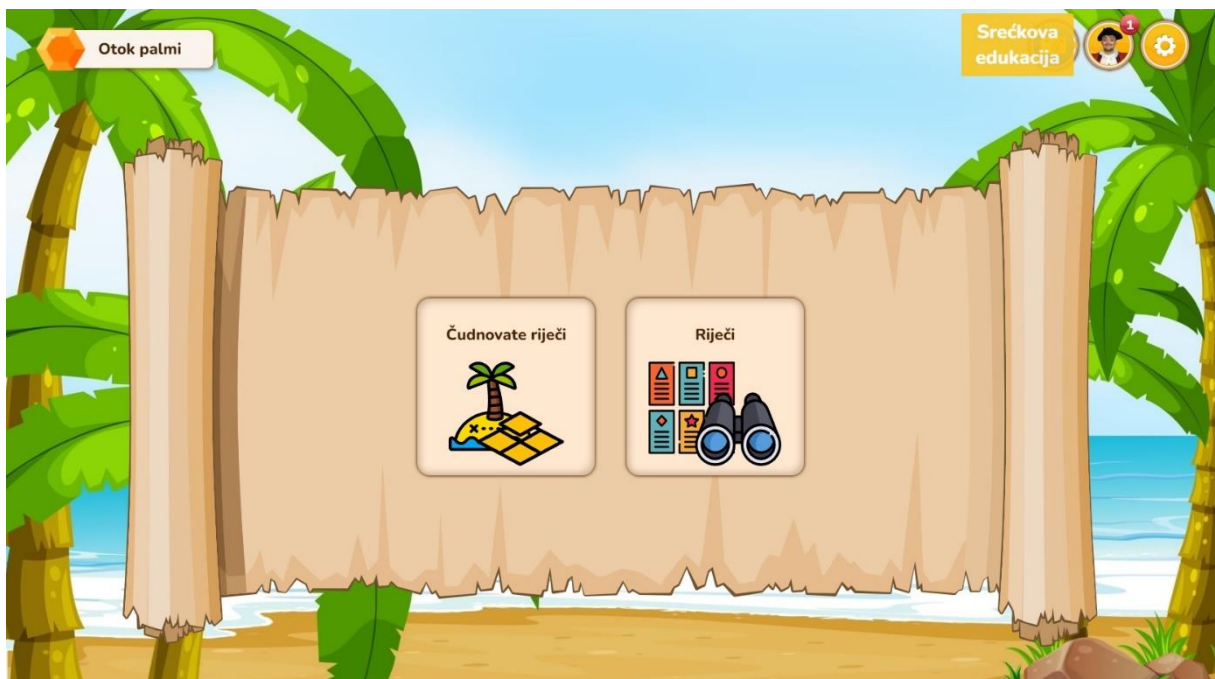

- U vježbi „Čudnovate riječi“ odabrani se glas usvaja u slogovima kroz zadatke „Popni se na palmu“ i „Otkrij“.
- U vježbi „Riječi“ odabrani se glas usvaja u riječima kroz zadatke „Brbljave kartice“, „Pronađi riječi“ te „Memori“.

Nakon što je odabrani glas usvojen u riječima, može se krenuti s uvježbavanjem glasa u rečenicama.


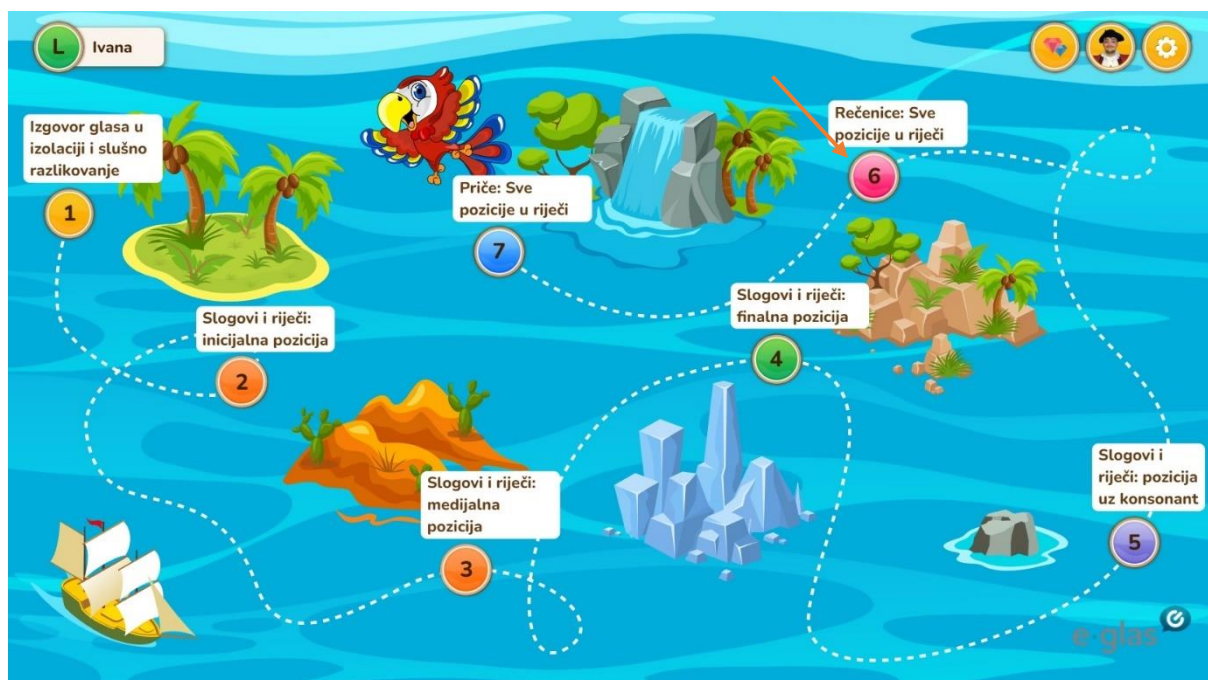


Predzadnji otok sadrži dvije vrste vježbi.



- U vježbama „Kolo sreće“ i „Nadopunjavanje“ usvaja se glas u ovim kraćim rečenicama.

Na posljednjem otoku, utvrđuje se izvježbani glas u dužim tekstovima.

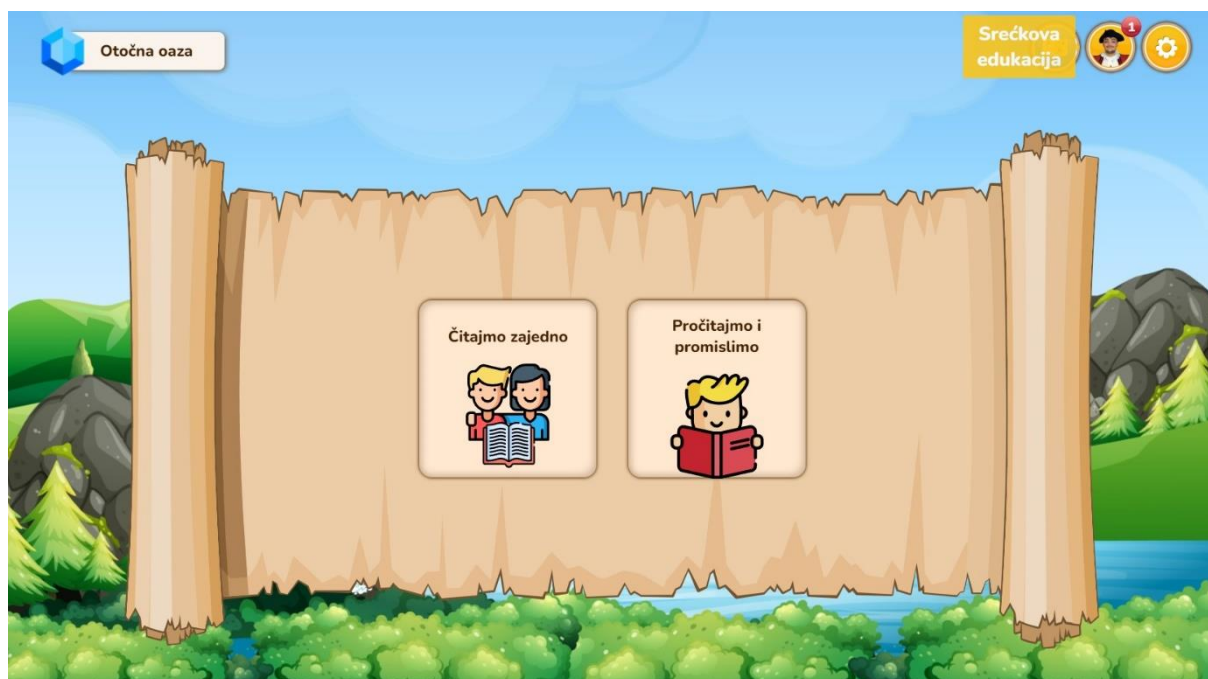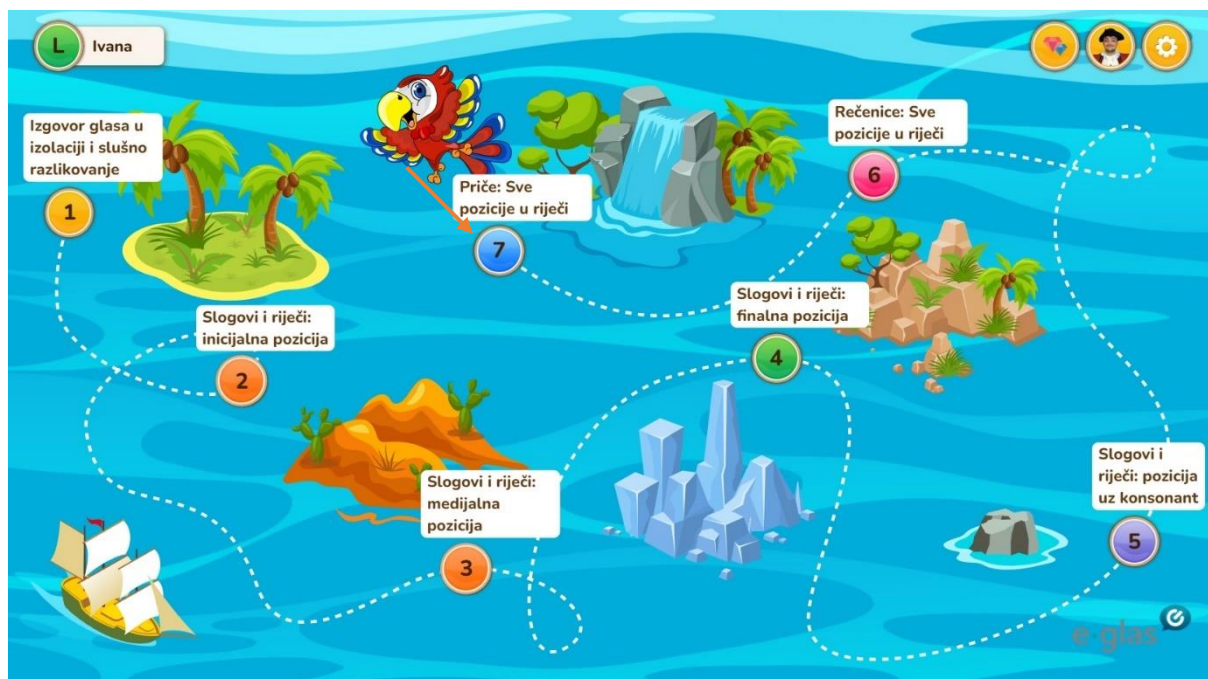



Već više od 10 godina bavimo se pomaganjem djeci s teškoćama u razvoju i znamo koliki je teret na logopedima koji žele maksimalno efikasno provoditi svoje terapije, održavajući djetetovu pažnju što duže usmjerenu na logopedске vježbe.

Koristeći najbolje stručne prakse i na temelju puno iskustva s tisućama djece koja su već koristila Kokolingo razvili smo sustav za maksimalno ubrzavanje ispravljanja pogrešno izgovaranih glasova i učinili smo ga što jednostavnijim za logopede, roditelje i dijete.

Skratite si vrijeme za pripremu materijala te olakšajte zadavanje vježbica za svakodnevni rad kod kuće, koji je neophodan za brzi napredak.

Vaš Kokolingo tim tvrtke E-Glas

Email: info@kokolingo.hr

Telefon: +385 51 670 379

Mob/Viber/WhatsApp: +385 95 369 3919

Adresa: Miroslava Krleže 4, Rijeka
